


Пластырь от боли в мышцах и суставах Pharmacels® KINETICLINE Tape - современное высокотехнологичное физиотерапевтическое средство, расширяющее ваши физические возможности, пробуждая скрытые в каждом организме внутренние резервы.

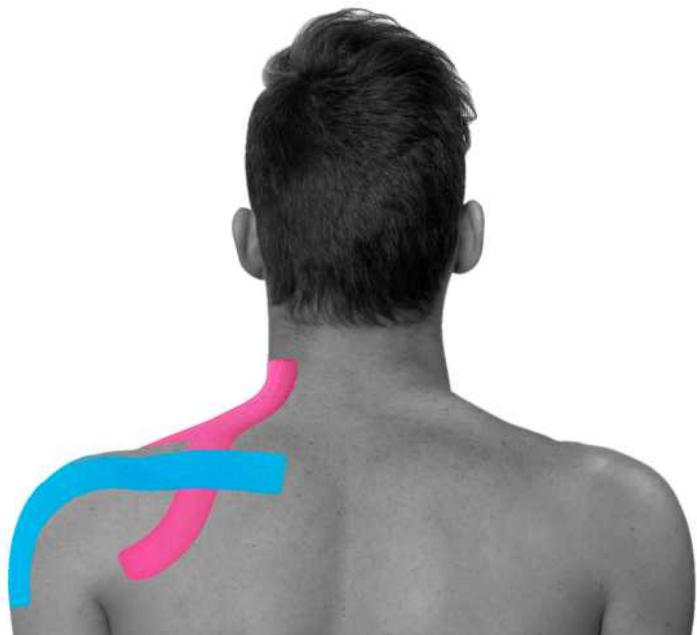

# KINETICLINE



18035 бежевый



18036 черный



18037 голубой



18038 розовый

Компания Pharmacels® традиционно уделяет повышенное внимание качеству производимых изделий. Жесткий контроль качества осуществляется на всех стадиях производства.



Pharmacels® KINETICLINE Tape - воплощение современного подхода к производству и образец качества. Гипоаллергенный клей, хлопковая основа ткани и герметичная упаковка гарантируют отсутствие любых побочных эффектов.



Специально разработанная формула клеевого состава обеспечивает гипоаллергенность и надежную фиксацию. Pharmacels® KINETICLINE Tape предназначен для использования, в равной степени, и в воде, и на сухе. Такая универсальность позволяет применять физиотерапевтические свойства KINETICLINE Tape продолжительное время, в обычной жизни, в различных областях медицины и в любых, в том числе и водных, видах спорта.



pharmacels

**во всех областях жизни**



### **в любом возрасте**

Применение KINETICLINE Тape оказывает благотворное влияние на человеческий организм независимо от возраста. Начиная с первых дней жизни и до глубокой старости KINETICLINE Тape может стать для каждого надежным физиотерапевтическим средством помогающим без использования мазей и таблеток преодолеть действительно большое количество недугов.

### **в медицине**

Травматология, ортопедия, лимфология, нейрология, акушерство и гинекология - далеко неполный перечень направлений традиционной медицины использующих на сегодняшний день Pharmacels® KINETICLINE Тape. Кинезиологическое тейпирование уверенно ежедневно доказывает свою клиническую эффективность. Все еще находясь в развитии этот метод уже на 100% доказал свою состоятельность.

### **в спорте**

Метод кинезиологического тейпирования пришел к нам из спорта высших достижений. За последние 10 - 15 лет этот метод покорил профессиональных атлетов всего мира. В наше время, практически во всех видах спорта, на соревнованиях всех уровней, спортсмены успешно используют кинезиологическое тейпирование. Легкий и технологичный Pharmacels® KINETICLINE Тape помогает снизить травматизм и установить новые спортивные рекорды!

### **в заботе о близких**

Пластырь от боли в мышцах и суставах Pharmacels® KINETICLINE Тape - это воплощение заботы и помощи, которая так необходима для любого человека в любом возрасте.




**pharmacels**

## Клей


При производстве Pharmacels® KINETICLINE Таре используется уникальный по своим характеристикам клей. Сочетание высокотехнологичных компонентов и высокие стандарты производства гарантируют полное отсутствие аллергических реакций.

В основе клея Pharmacels® KINETICLINE Таре открытая структура состоящая из молекул с увеличенной в несколько раз силой поверхностного натяжения. Имея физическую природу эта сила умноженная на количество молекул создает мощную приклеиваемость, во много раз превосходящую приклеиваемость обычных пластырей и тейпов.

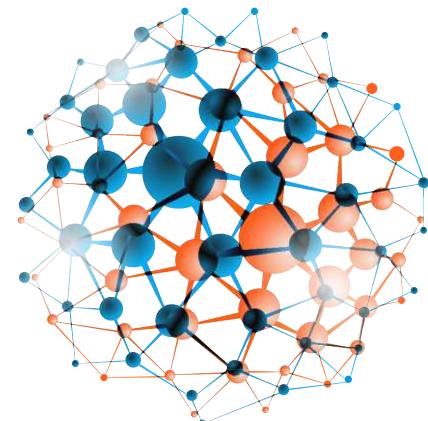


## Ткань

Pharmacels® KINETICLINE Таре создан из особенной ткани. Легкая, прочная и эластичная она сжимается и растягивается, точно повторяя малейшие растяжения и сжатия кожного покрова человека. В основе ткани двухкомпонентная нить, состоящая из эластичной основы обвитой тонкой поверхностной нитью из натурального

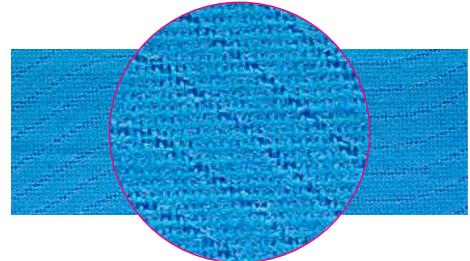

## Упаковка

Упаковка Pharmacels® KINETICLINE Таре удобна, практична и современна. Каждый рулон кинезиологических тейпов Pharmacels® надежно защищен от воздействия воздуха и влаги прозрачной пластиковой оболочкой. Такая упаковка изделия позволяет сохранить гигиеническую чистоту, отвечающую высоким международным санитаро-эпидемиологическим требованиям.

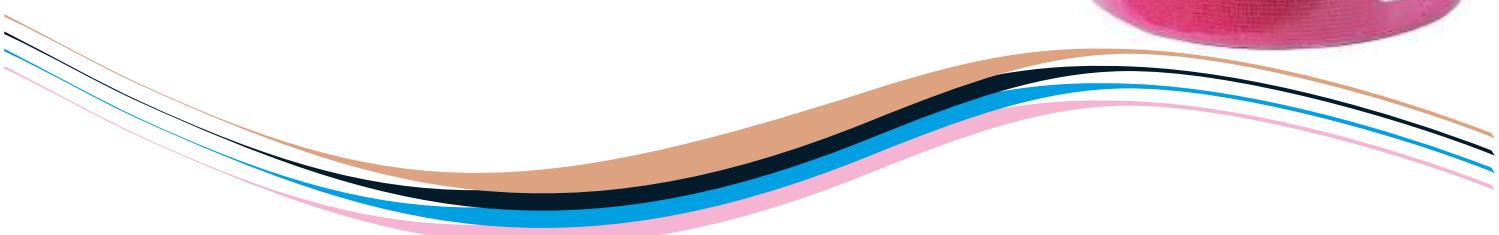



18131 бежевый



18132 черный



18133 красный



18134 голубой



Каждый день Pharmacels® защищает здоровье всех, кто занимается спортом или ведет активный образ жизни



pharmacels



KINETICLINE 4 m x 5 cm  
бежевый # 18135



KINETICLINE 4 m x 5 cm  
черный # 18136



KINETICLINE 4 m x 5 cm  
розовый # 18138



KINETICLINE 4 m x 5 cm  
голубой # 18137



KINETICLINE 5m x 5cm  
бежевый #18035



KINETICLINE 5m x 5cm  
черный #18036



KINETICLINE 5m x 5cm  
розовый #18038



KINETICLINE 5m x 5cm  
голубой #18037



KINETICLINE 5m x 5cm  
4 рулона/коробка  
бежевый # 18031



KINETICLINE 5m x 5cm  
4 рулона/коробка  
черный # 18032



KINETICLINE 5m x 5cm  
4 рулона/коробка  
розовый # 18033



KINETICLINE 5m x 5cm  
4 рулона/коробка  
голубой # 18034



KINETICLINE 31,5m x 5cm  
бежевый # 18131



KINETICLINE 31,5m x 5cm  
черный # 18132




KINETICLINE 31,5m x 5cm  
красный # 18133



KINETICLINE 31,5m x 5cm  
голубой # 18134





## Как это использовать?

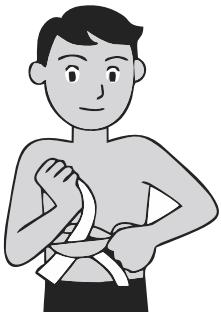

Кожа в месте тейпирования должна быть чистой, сухой и не иметь повреждений


Отрежьте ножницами полоску тейпа необходимой длины, если это необходимо, подготовьте тейп и закруглите все углы.

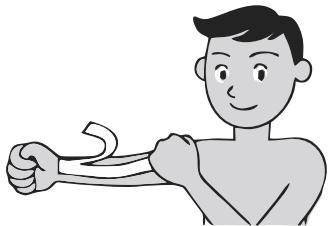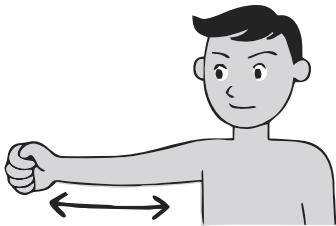


Придайте мышцам положение, необходимое для тейпирования (как правило, мышцу нужно привести в растянутое состояние).

Приклейте полоску тейпа. Хорошо прижмите её по всей длине, по краям и углам.

## Как подготовить тейп?

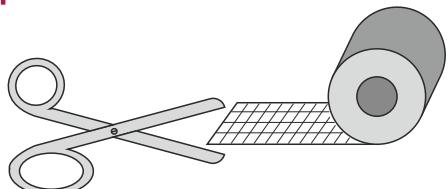

Перед использованием необходимо подготовить(раскроить) KINETICLINE Tape ножницами. Используйте специальные ножницы Pharmacels® Universal Bandage Shears. Это гарантирует отличный результат!

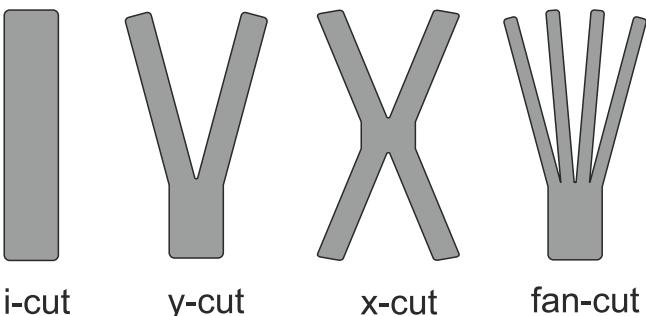


i-cut

y-cut

x-cut


fan-cut

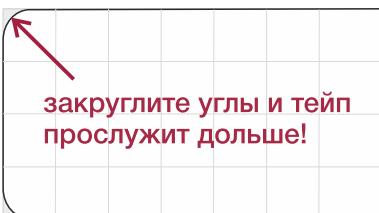


**закруглите углы и тейп прослужит дольше!**

Отрезав полоску тейпа нужной длины и формы, закруглите все углы. Тогда повязка прослужит дольше. Используйте это правило для всех, без исключения пластырей!


## Как правильно приклеить тейп?

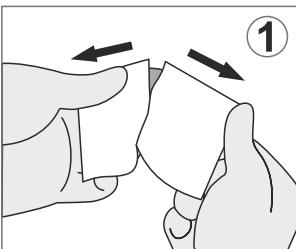

Надорвите небольшой участок бумаги (приблизительно 1,5 см) и удалите его. Это начало повязки - первый «якорь». Приклейте его без натяжения и очень аккуратно. Страйтесь не дотрагиваться до поверхности клея пальцами - это может повлиять на качество приклеивания в этом месте.

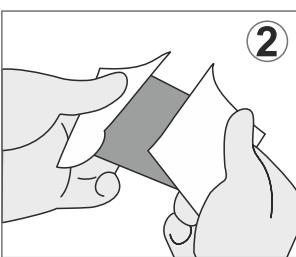

При克莱ив первый «якорь» осторожно отведите защитную бумагу до противоположной стороны полоски тейпа не доходя приблизительно 1,5 см до конца. Удерживая тейп пальцами за бумагу и внешнюю поверхность, растяните тейп примерно на 60% одной рукой и приклейте к телу ладонью другой руки.

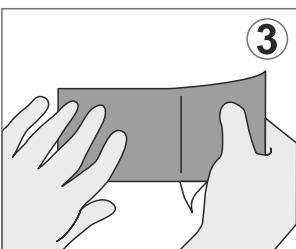

В этой фазе наложения тейпа вы можете придать полоске необходимый изгиб. Не удаляйте сразу всю защитную бумагу. Это может осложнить процесс наложения тейпа. При克莱ив среднюю часть с натяжением приблизительно 60% удалите бумагу и сделайте 2-ой якорь без натяжения.

**KINETICLINE**  
**SPORT NEVER STOP!**