

# PATELLA Stabiliser KNEE brace PRO



(УСИЛЕННЫЙ НАКОЛЕННИК)

## Инструкция по использованию:

1. Расстегните фиксирующие ремни.
2. Примите сидячее положение и наденьте наколенник.
3. Коленная чашечка должна находиться точно в отверстии, расположенном в передней части изделия.
4. Застегните фиксирующие ремни.
5. Изделие должно плотно прилегать всей внутренней поверхности, но не пережимать колено слишком сильно.

• 2 пары плоских пружин из медицинской стали

• пателлярный контрофорс

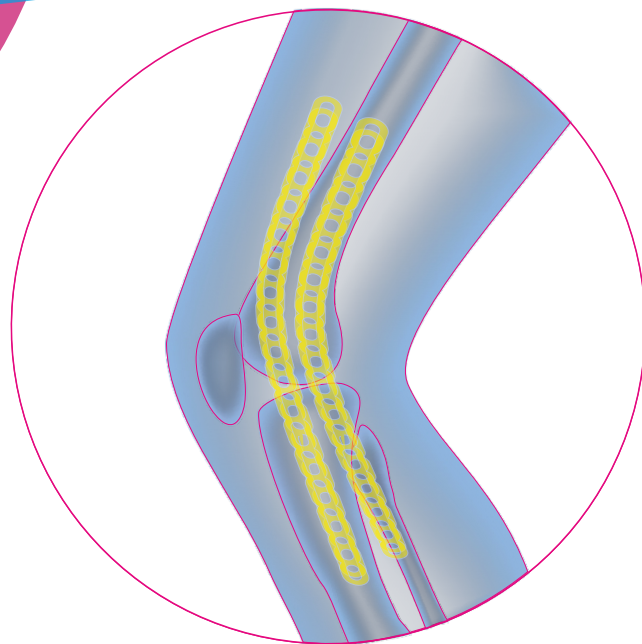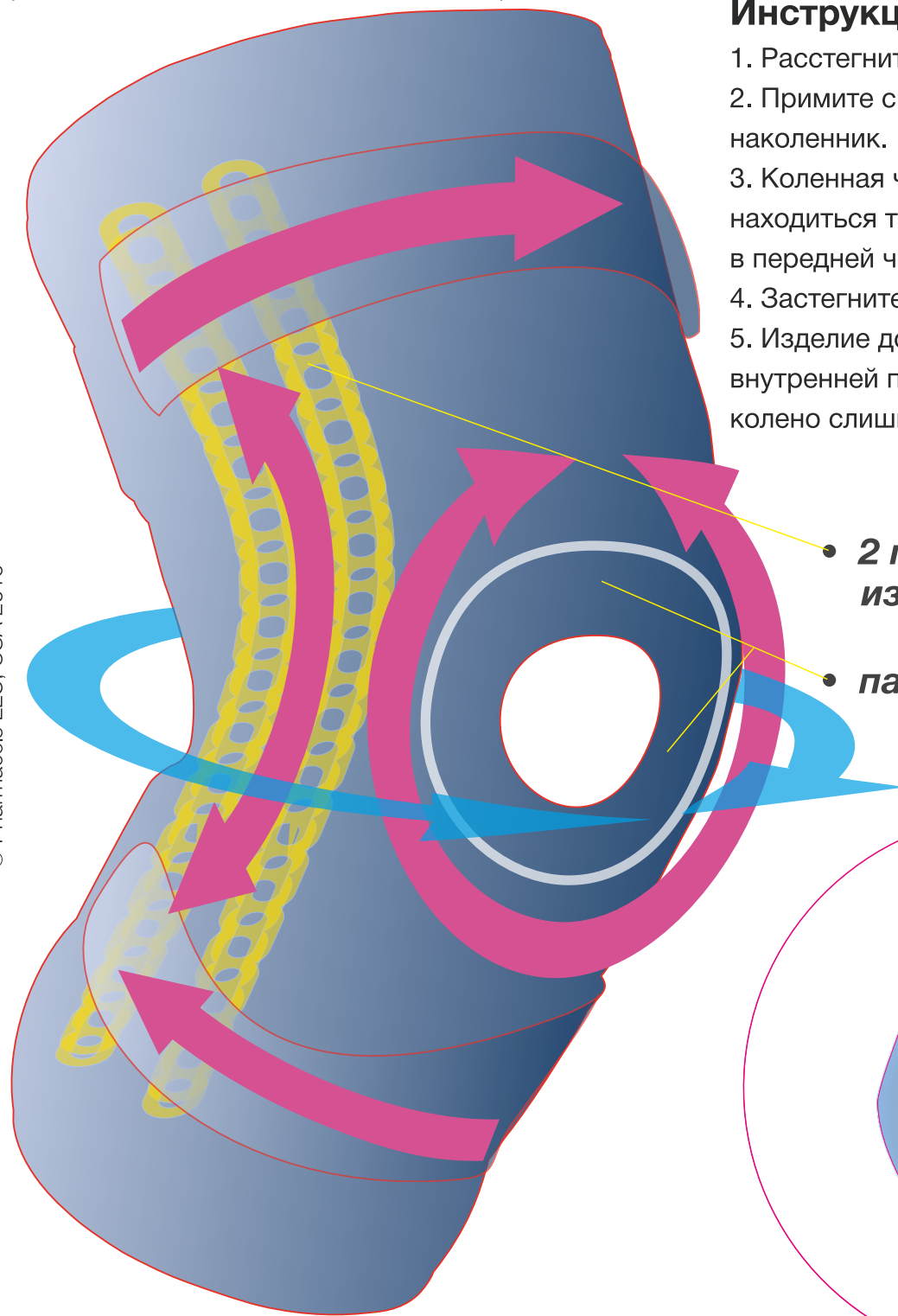

### PRODUCT CARE:



СТИРАЙТЕ В ПРОХЛАДНОЙ ВОДЕ  
С МЯГКИМ МОЮЩИМ СРЕДСТВОМ.  
НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ ОТБЕЛИВАТЕЛЬ  
ИЛИ СМЯГЧИТЕЛЬ ВОДЫ.  
СУШИТЬ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ.



Mfg. & Mktd. by:  
Pharmacels, LLC.  
PO Box 220407 Great  
Neck, NY 11022, USA  
[www.pharmacels.com](http://www.pharmacels.com)

тел/факс: +7(495) 971-1753  
[www.pharmacels.ru](http://www.pharmacels.ru)

