

Технические характеристики

Параметры	Модель AR-001	Модель AR-002	Модель AR-003	Модель AR-008	Модель AR-009	Модель AR-023
Регулировка высоты:	79-96 см	79-96 см	70-83 см	70-83 см	78-85 см	79 - 89см
Ширина ходунков в разложенном виде:	50 см	50 см	50 см	50 см	600 см	57 см
Ширина (толщина в сложенном виде):	10 см	10 см	10 см	10 см	20 см	10 см
Вес:	2,3 кг	2,5 кг	2,3 кг	2,3 кг	1,9 кг	2,4 кг
Максимальная допустимая нагрузка	136 кг	136 кг	136 кг	136 кг	110 кг	120 кг

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

обязательно приложить чек

Дата продажи	Печать и подпись продавца
Номер чека покупки	
Номер партии	

- 1) Простое товарищество «Армедикал» (Armedical S.C.) 41-303 Домброва-Гурница, ул. Розьдзеньского 19, настоящим предоставляет 12-месячную гарантию на изделие. Гарантийный период исчисляется с момента покупки изделия Пользователем.
- 2) В рамках гарантии ПТ «Армедикал» обязуется выполнить необходимый ремонт для возвращения изделию надлежащего функционирования в срок до 14 дней со дня получения неисправного товара.
- 3) ПТ «Армедикал» оставляет за собой право обменять товар на исправный, в случае если посчитает его ремонт нецелесообразным.
- 4) В случае обнаружения того, что изделие функционирует не должным образом, следует безотлагательно связаться с пунктом, в котором была осуществлена покупка или выслать ее на адрес производителя.
- 5) Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные механическими факторами. Гарантия не распространяется на товар в отношении изношенных в процессе нормальной эксплуатации расходных элементов, (т.е. износ резиновых насадок, колес модели AR-003, пластиковых поручней модели AR-008).
- 6) Гарантия не действует в случае использования изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации, а также в случае превышения пользователем максимальной допустимой нагрузки, указанной производителем.
- 7) Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате несанкционированного, произведенного пользователем или другими не авторизованными на то лицами, ремонта, переделки или конструктивного изменения изделия.
- 8) Гарантия действительна исключительно вместе с документом, подтверждающим покупку, и настоящим гарантийным талоном.
- 9) Жалобы необходимо подавать только в виде письменного рекламационного протокола, определяющего вид подтвержденных дефектов и обстоятельства их получения. В случае несоблюдения условий подачи жалобы, описанных в настоящем руководстве, гарантийные обязательства аннулируются.
- 10) Ходунки алюминиевые применяются и используются в хозяйственно-бытовом назначении.
- 11) Не являются изделием медицинского назначения.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ХОДУНКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ



Ходунки алюминиевые складные .Шагающие - Устойчивые. Одиночная Н-образная рама
Модель: AR-001



Ходунки алюминиевые складные .Шагающие - Устойчивые. Двойная Н-образная рама
Модель: AR-002



Ходунки алюминиевые складные с двумя колесами
Модель: AR-003



Ходунки алюминиевые складные – двухуровневые
Модель: AR-023




Ходунки алюминиевые складные с мячом – 2 колеса
Модель: AR-009



Ходунки алюминиевые складные – 3 функции
Модель: AR-008

Изготовитель:
ARMEDICAL S.C.
Ул. Розьдзеньского 19, 41-303 Домброва-Гурница, Польша
ul. Rożdżeńskiego 19, 41-303 Dąbrowa Górnicza, Poland
тел. факс: +48 32 261 71 36, +48 32 268 63 05 www.armedical.pl,
e-mail: biuro@armedical.pl

Издание 2 от 01.10.2015

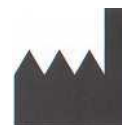



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – ХОДУНКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ

Уважаемые господа,

Благодарим за выбор нашего товара, мы ценим оказанное нам доверие. Мы приложили максимум усилий, чтобы наши приспособления оправдали ваши ожидания, и надеемся, что они помогут вам безопасно передвигаться по дому и совершать ежедневные прогулки. Перед применением ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации и обязательно соблюдайте рекомендации, касающиеся безопасного использования. Также просим сохранить данную инструкцию, которая одновременно является гарантийным талоном.

Назначение изделия:

Данные ходунки являются оборудованием для пожилых людей для людей с проблемами нахождения в вертикальном положении или испытываемыми трудностями с поддержанием равновесия во время ходьбы. Ходунки также используются для поддержания равновесия во время реабилитационного периода при обучении хождению после тяжелого заболевания или травмы.

Эксплуатационные характеристики:

Максимальный вес пациента, обеспечивающий безопасное использование ходунков – **136 кг** – (model: AR-001, AR-002, AR-003, AR-008), **110кг** - (model AR-009), **120кг** - (model AR-023)

Замечания и предупреждения:

Во избежание несчастных случаев, пожалуйста:

- 1) Убедитесь, что все трубки прямые, без надломов (полученных, например, при транспортировке)
- 2) Убедитесь, что все ножки выставлены на одинаковую высоту
- 3) Убедитесь в наличии резиновых насадок на всех ножках и в их надлежащей установке
- 4) Убедитесь, что все колеса надежно закреплены (для моделей AR-003, AR-008, AR-009).
- 5) Убедитесь, что все заклепки прочно скрепляют детали ходунков.
- 6) Не устанавливайте ходунки на скользких поверхностях (пролитая жидкость, лед).



Во избежание травм:

- 1) Ходунки должны быть полностью разложены (блокирующая защёлка на перекладине должна «попасть» в предназначенное для нее отверстие в поперечной балке).
- 2) Каждый раз перед использованием необходимо проверять устойчивость ходунков.
- 3) Все ножки ходунков должны быть установлены на одинаковой высоте
- 4) Используйте только на плоской твердой поверхности. Не используйте на лестнице!
- 5) Следует соблюдать предельную осторожность на мокрой или скользкой поверхности.
- 6) Во время использования ходунков следует обращать внимание на лежащие под ногами ковры, предметы одежды, игрушки и т.д. Будьте осторожны с лежащими животными, неровными и потрескавшимися поверхностями.
- 7) Ходунки нельзя подвергать длительному воздействию экстремальных погодных условий (например, сильный мороз или прямой солнечный свет).
- 8) Нельзя превышать допустимый вес нагрузки, определенный производителем.

Уход:

Ходунки необходимо регулярно чистить, используя только воду и мягкое моющее средство. После чистки изделие следует протереть насухо мягкой тряпкой. Не используйте абразивные чистящие средства! Резиновые элементы, насадки на ножки являются расходными элементами и требуют регулярной замены.

Поиск и устранение неисправностей:

В случае возникновения проблемных ситуаций ознакомьтесь со следующим разделом. Если вопрос не решится, обратитесь в пункт продаж или обслуживания. Самостоятельный ремонт **ЗАПРЕЩЕН!!!** Это может привести к несчастному случаю.

I. Ходунки неустойчивы.

- А) Все ли ножки ходунков установлены на одинаковой высоте? Если нет, следует установить их правильно.
- Б) На всех ли ножках есть резиновые насадки? Если нет, следует их надеть.
- В) Все ли резиновые насадки правильно надеты? Если нет, следует хорошо их прижать.
- Г) Полностью ли разложены ходунки? Если нет, блокирующую защёлку следует вдавить в отверстие на поперечной балке.
- Д) Надежно ли закреплены все колеса? Если нет, свяжитесь с пунктом продаж. Относится к моделям: AR-003, AR-008, AR-009.
- Е) Все ли элементы ходунков устойчиво скреплены между собой заклепками? Если нет, свяжитесь с пунктом продаж.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



1. Пластиковые ручки
2. Фиксирующие зажимы
3. Фиксирующее отверстие
4. Блокирующая защелка
5. Кнопочная защелка
6. Резиновые насадки

Подготовка к использованию

- 1) Достаньте ходунки из картонной или пленочной упаковки.
- 2) В первую очередь необходимо проверить техническое состояние изделия в соответствии с пунктами раздела «Замечания и предупреждения».
- 3) Возьмитесь двумя руками за пластиковые ручки (1) и потяните поручни по направлению наружу до полного разложения ходунков. Блокирующая защелка на поперечной балке (4) должна попасть в соответствующее отверстие (при складывании ходунков нажмите на защелку (4), расположенную посередине поперечной балки, а затем потяните один из поручней по направлению внутрь. Это позволит разблокировать защелку, сложить второй поручень и, таким образом, полностью сложить ходунки. Для модели AR-009 возьмитесь за раму, к которой крепятся колеса, одной рукой, другой рукой – за раму, крепящуюся к ножкам с резиновыми насадками и разложите до упора. Затем переместите поперечную балку к «ограничителям». Складывание модели AR-009 – чтобы полностью сложить ходунки, потяните мяч вверх.
- 4) Следует установить высоту ходунков в соответствии с ростом пользователя. Для этого нужно нажать на кнопку защелку (5), расположенную на ножке, что вызовет ослабление блокировки. Установите желаемую высоту, раздвигая или сдвигая трубку, . Головка защелки **должна** попасть в отверстие на нужной высоте! Повторите действие для всех ножек. Головка защелки во всех ножках должна находиться на одинаковой высоте.
- 5) Ходунки шагающие (AR-001, AR-002, AR-008). Извлеките фиксирующие зажимы (2) из фиксирующих отверстий (3) и вставьте их в положение (2) на раме. Возьмитесь двумя руками за пластиковые ручки (1) и немного потяните по направлению вверх, а затем потяните наружу правую или левую часть ходунков. Выполните эти шаги, соблюдая последовательность, указанную в руководстве.

Завершение использования:

1. Сложите ходунки, нажав на блокирующую защелку (4) или (потяните мяч вверх - для модели AR-009), а затем переместите один из поручней по направлению внутрь. Это разблокирует защелку и позволит сложить ходунки.

Очистка и хранение:

1. Храните ходунки в месте, в котором они будут защищены от механических повреждений
2. В случае загрязнения используйте информацию раздела «Уход» настоящего руководства по эксплуатации.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШ ВЫБОР ПРИ ПОКУПКЕ НАШЕГО ТОВАРА