


SWISS AIR

QuickStart Guide Nosepad

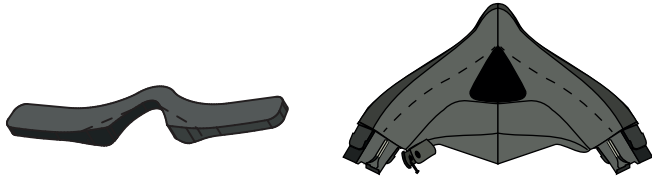

1

Important!
Place the nose tails as shown symmetrically

Wichtig!
Das Nasenpolster wie abgebildet symmetrisch anordnen

2

b) Folie beidseitig ca. 1cm abziehen

b) Peel off the foil approximately 1cm on both sides

1cm 1cm

a) Folie wie abgebildet vorsichtig einschneiden

a) Cut carefully the foil as shown

3

Applicate the middle piece with the peeled off part inside the mask

Die abgezogene Fläche mittig auf die Mitte der Maske auftragen

4

Peel off one side completely and applicate the side completely on the mask (with pressing the nose pad on the mask), then repeat this step on the other side

Die Folie auf einer Seite komplett abziehen und auf die Maske aufbringen (Nasenpolster anpressen), danach den gleichen Schritt auf der anderen Seite wiederholen

5

Finished - please try your mask, if it squeezes your nostrils, you can adjust the nose pad by removing the perforated part as shown

Fertig - bitte probieren Sie die Maske an, wenn das Polster Ihre Nasenflügel zusammendrückt können Sie das Polster anpassen durch entfernen der perforierten Fläche, wie unten gezeigt