

Бандаж на коленный сустав

ARK2102B

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Бандаж изготовлен из высококачественного материала, что делает использование изделия максимально безопасным и комфортным. Высокое качество изделия подтверждено международными и европейскими сертификатами на соответствие стандартам качества ISO 9001:2008, ISO 13485:2012, EN 14971:2004, MDD 93/42/EEC.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Боли в коленном суставе, обусловленные артритами, синовиитами и бурситами.
- Лечение ушибов, частичных повреждений связок коленного сустава.
- Реабилитация после травм и операций на коленном суставе.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- Бандаж усилен силиконовым кольцом в области коленной чашечки, что позволяет дополнительно стабилизировать надколенник, защитить его и уменьшить болевой синдром.
- Пружинные вставки обеспечивают дополнительную фиксацию и снижают нагрузку на сустав при движении. Так же предотвращают скручивание изделия при носке.
- Регулятор-застежка позволяет более точно подогнать изделие по индивидуальным формам бедра (в размерах XXL и XXXL имеется дополнительная регулятор-застежка в области голени).

www.prolife-orto.com

Prolife® is the registered trademark by Montex Swiss AG,
Tramstrasse 16, CH-9442, Berneck, Switzerland

- Эластичная вставка на задней части биндажа не оказывает избыточное давление на область подколенной ямки и предотвращает потертости при носке.
- Биндаж изготовлен из трехслойного композитного материала AEROTEX — воздухопроницаемого и эластичного материала, обладающего согревающим и микромассажным действием.

ПРИМЕНЕНИЕ

Изделие необходимо надевать на колено более широкой частью, зафиксировав прилегание с помощью застежки-липучки. Подходит для правой и левой ноги.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед началом использования изделия проконсультируйтесь с врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции изделия. Не допускается эксплуатация поврежденного изделия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Местные заболевания кожи являются противопоказанием для применения изделия. При гиперчувствительности к компонентам материала изделие необходимо надевать на нижнее белье. Не надевать изделие при использовании согревающих мазей в области коленного сустава.


Подбирать размер необходимо непосредственно по обхвату колена согласно таблице:

Область измерения	Размеры					
	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Обхват колена, см	34-36	36-38	38-41	41-44	44-47	47-50



При измерении обхвата колена сантиметровая лента должна плотно прилегать к телу, не нужно слишком ее натягивать или ослаблять.

СХЕМА НАДЕВАНИЯ

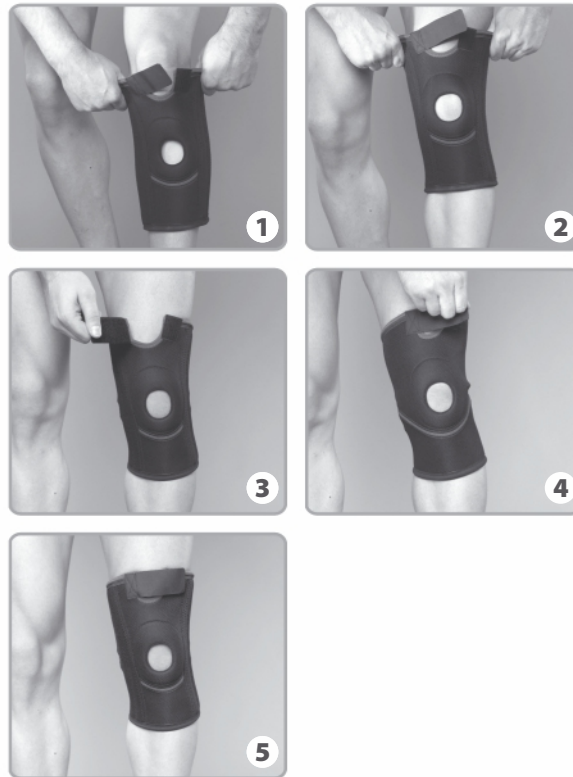

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Использовать ручную стирку мягкими моющими средствами при температуре не выше +30°C. Во время стирки не тереть и не выкручивать. При сушке избегать контакта с прямыми источниками тепла. Не гладить. Не отбеливать (не использовать моющие средства, содержащие хлор). Не подвергать сухой химической чистке. Не подвергать воздействию высоких температур (выше +120°C).

Состав: полиэстер 40%, поролон 60%, застежка Velcro (липучка), силиконовое кольцо, 4 пружинные вставки.

Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +5°C до +40°C, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Срок хранения: 5 лет от даты изготовления. После окончания срока хранения производитель не гарантирует сохранение достаточной эластичности изделия.

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты покупки.

Дата производства: см. на упаковке.

Размер: см. на упаковке.



Производитель: Хегели Ортопедик Урунлер Сан. Ве Тик. Лтд. Сти. Джиангир Мах. Сехит Пиядеер Явуз Бахар Сок. №4 Мираббо СанаиСитези Д. Блок Кат. 3 Амбарли, Авджиляр, Стамбул, Турция.