

ПАМЯТКА



КРЕПЛЕНИЕ ПАУКА

Крепление «ПАУКА» осуществляется при помощи соединительных карабинов к петлям, предварительно помещенным в люверсы крепления петель для крепления строп эвакуации. Петли образуют по 2 точки крепления на каждой стороне носилок. Крепление усов каждой половины «ПАУКА» осуществляется к своей стороне носилок. Необходимо поочередно произвести соединение каждого уса с петлей на носилках при помощи соединительного карабина. Длинный ус паука крепится к нижней петле (возле ног), а короткий ус крепится к верхней петле (возле головы) с той же стороны носилок. После чего необходимо аналогично прикрепить усы «ПАУКА» с другой стороны носилок. Перед помещением эвакуируемого/пострадавшего в носилки или извлечения его из них, половинки «ПАУКА» необходимо развести в разные стороны (наружу от носилок), что бы они не препятствовали помещению или извлечению эвакуируемого.

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ КАРТА

МОДЕЛЬ - Многофункциональные носилки НС-350

Серийный номер:

Производитель: ООО «Альптехнологии»	Адрес: 117216, Москва г., Куликовская ул., дом 20, помещение 1, комната 159.	Телефон, e-mail, веб-сайт: +7 (495) 295-66-20 info@alpsafe.ru
Дата изготовления: ноябрь 2024	Дата продажи:	Дата ввода в эксплуатацию:
Прочая релевантная информация		

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ) Многофункциональные носилки НС-350



Производитель: ООО «Альптехнологии» 117216, Москва г., Куликовская ул., дом 20, помещение 1, комната 159.
Телефон 8(495) 295-66-20, E-mail: info@alpsafe.ru, www.alpsafe.ru

Внимательно изучите инструкцию перед началом использования!



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НОСИЛКАХ

Многофункциональные носилки НС-350 - это специальное оборудование, предназначенное для транспортировки и эвакуации пострадавших в экстремальных условиях. Эргономичная конструкция обеспечивает возможность оказания первой помощи пострадавшему в сложных условиях, например в труднодоступных горных районах, с воздуха или на море. В эксплуатации данные носилки просты и надежны, что облегчает процесс оказания первой помощи пострадавшим.

Основные свойства многофункциональных носилок НС-350:

- Носилки изготовлены из нетоксичного и экологически чистого полиэтиленового материала, который обладает противопожарными свойствами, устойчивостью к истиранию и коррозии;
- Носилки оснащены регулируемым механизмом безопасности для ног;
- Смягчающая подкладка с пластиковым дном обеспечивает удобную поддержку травмированной спины;
- Носилки оснащены 4 стропами для удобной подвески и разборки;
- Разъемная конструкция для обеспечения большего удобства хранения и транспортировки;
- Универсальность позволяет использовать носилок для эвакуации в различных средах и под различными углами - вертикальный, поступательный и наклонный;
- Прочная рама и высокая грузоподъемность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура эксплуатации:	от -60°до +50°
Габариты, мм:	2180 x 620 x 180
Масса, кг:	21
Максимальная грузоподъемность, кг:	300
Материал:	Полиэтилен, алюминий

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием носилок ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Многофункциональные спасательные носилки НС-350 эксплуатируются в соответствии с руководством по эксплуатации и не требуют специального обслуживания. Устройство необходимо чистить без применения агрессивных материалов и растворов, способных повредить материал, из которого оно изготовлено. Для очистки устройства хорошо подходит обычная теплая вода и слабощелочные чистящие средства (например, мыло). Очистить устройство необходимо с помощью тряпки, ветоши, смоченной в теплом мыльном растворе, смыть раствор и насухо протереть. Не следует применять высокоабразивные или содержащие металл губки и моющие средства, которые могут поцарапать или иным образом повредить устройство. Запрещено при чистке использовать щелочи, кислоты и растворители.

4. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

- Разрешается транспортировать любым видом транспорта в упаковке изготовителя при условии защиты от механических воздействий, осадков и воздействия агрессивных сред;
- Перед вводом в эксплуатацию устройство храниться в чистом сухом месте, в условиях не допускающих возникновения механических и химических повреждений. Помещение для хранения изделия должно быть сухим, чистым, проветриваемым. Относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать 85%, температура окружающего воздуха в помещении от минус 30 до плюс 45С.;
- Очистку носилок от грязи производить мыльной водой и ветошью с последующей тщательной просушкой;
- Оберегайте носилки от воздействия прямых солнечных лучей при сушке и хранении;
- Дезинфекцию носилок производят после очистки с помощью щетки, смоченной в 1-3 процентном растворе хлорамина;
- Запрещается хранить изделие совместно с агрессивными химическими веществами.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации Многофункциональных спасательных носилок НС-350 составляет 1 год с даты продажи. Срок хранения 5 лет со дня продажи. Фактический срок службы изделия зависит от определенных факторов: таких как интенсивность и частота использования, воздействие окружающей среды, компетентность пользователя, условия хранения и ухода за СИЗ от падения с высоты, окончание срока хранения и пр. С рекламацией покупатель должен обращаться в торговую организацию или непосредственно к производителю по адресу: 142184, Московская область, городской округ Подольск, д. Слащево, дом 1, стр. 1.

Претензии принимаются при наличии Паспорта изделия с отметкой о дате продажи.

Внимание! Срок службы может сократиться до одного использования, например: при работе с агрессивными химическими веществами, при экстремальных температурах, при контакте с острыми гранями, после воздействия динамической нагрузки.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Правила эксплуатации при хранении:

- Оберегайте носилки от воздействия прямых солнечных лучей при хранении;
- Храните носилки сухими и очищенными от загрязнений и вдали от отопительных приборов;
- Оберегайте стропы и швы носилок от повреждений (запрещено использование носилок с поврежденными стропами);
- Не храните носилки вне транспортировочных чехлов (при наличии) и заводской упаковки;
- Перед использованием носилок проведите осмотр ремней и стропов на предмет отсутствия повреждений;
- Очистку носилок от грязи производить слабощелочными чистящими средствами в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Порядок сборки:

- Разложить комплектующие многофункциональных носилок НС-350;
- Установить 2 отдельные части носилок на горизонтальную поверхность;
- Соединить 2 части носилок между собой, вставив направляющие одной части в соответствующие разъемы второй части, закрепив их блокирующими штифтами;
- Закрепить на носилках фиксирующие ремни и стропы для эвакуации.

Порядок применения:

- Привести носилки в рабочее состояние;
- Установить носилки на горизонтальную поверхность, при этом концы фиксирующих ремней должны быть откинuty в стороны;
- Уложить пострадавшего на носилки и пристегнуть его фиксирующими ремнями, застегнув соединительные пряжки в замки.
- Взявшись за ручки носилок или пристегнув эвакуационные стропы в местах крепления, поднять и приступить к транспортировке пострадавшего. При транспортировке необходимо оберегать пострадавшего от толчков и ударов, способных ухудшить его физическое состояние.
- После завершения переноса/эвакуации опустить носилки на горизонтальную поверхность и освободить фиксирующие ремни. Извлечь пострадавшего из носилок.

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ НОСИЛКИ:

- без предварительного осмотра;
- с видимыми дефектами или обнаруженными трещинами на пластиковом корпусе;
- с разлохмаченными стропами, петлями, ремнями и неисправными пряжками и карабинами.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- оставлять носилки с пострадавшим без присмотра;
- транспортировка пострадавшего без надежной фиксации в носилках;
- использовать носилки не по назначению.