

ЭНЗИМОСЕПТ

Профессиональный стандарт очистки медицинских изделий



Что такое ЭНЗИМОСЕПТ?

Это инновационное ферментативное средство с пониженным пенообразованием для глубокой очистки инструментов.

Сила трех ферментов



Протеаза

Эффективно расщепляет белковые загрязнения и кровь.



Липаза

Устраняет жировые отложения и масляные пленки.



Амилаза

Растворяет крахмалистые соединения и полисахариды.

Идеально для ПСО

Предстерилизационная очистка (ПСО):

- ✓ Хирургические инструменты
- ✓ Стоматологический инвентарь
- ✓ Микрохирургические изделия

Устраняет биологические пленки и обеспечивает стерильную чистоту.

 Медицинские инструменты

Очистка эндоскопов



Ручной способ

Бережная предварительная и окончательная очистка.



Автоматизация

Полная совместимость с МДМ и УЗО-установками.

Безопасность применения

6.5

Нейтральный pH

Забота о материалах

Средство не вызывает коррозию металлов и не повреждает термочувствительные материалы. Ваши инструменты прослужат дольше!

Режимы обработки

Объект обработки	Концентрация	Время (мин)
ПСО ИМН (ручной способ)	0,5% / 1,0%	10 мин
Эндоскопы (окончательная очистка)	0,5%	10 мин
Обработка в УЗО	0,5%	5 - 15 мин
Обработка в МДМ (при 45°C)	0,5%	10 мин

Долговечность и качество



Продление срока эксплуатации

Уникальный состав с комплексом стабилизаторов ферментов предотвращает износ дорогостоящего оборудования, сохраняя его функциональность годами.

Срок годности концентрата: 2 года.

Чистота без компромиссов

Выбирайте ЭНЗИМОСЕПТ для высшего уровня гигиены

 Сохраняет свойства после заморозки

 Разработано ООО "Полисепт"


Image Sources



Thumbnail for

https://media.istockphoto.com/id/2168041838/photo/medical-tools-on-a-tray-with-a-gloved-hand.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=4idiNd_815wmNHKSLlirGfAlykRE0wiBfLuw7sC

www.istockphoto.com Source: www.istockphoto.com

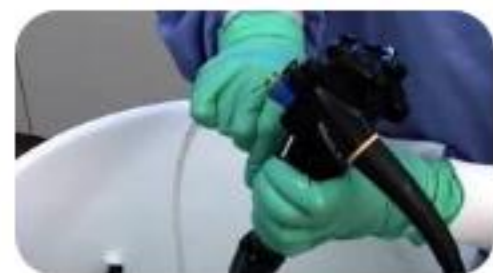

https://www.medservicerepair.com/images/easyblog_articles/109/endoscope-cleaning.jpg

Source: www.medservicerepair.com